

Este Conjunto Contém

- Auscultador reversível com diafragma grande e pequeno
- 1 Par binaural cromado com fone intra-auricular de plástico
- Tubo grosso de 22" com suporte de cinto de metal
- Auscultadores intercambiáveis tipo sino para adultos, crianças e bebês
- Fones intra-auriculares sobressalentes, tamanhos grandes e pequenos
- Diafragmas de plástico transparentes sobressalentes, tamanhos grandes e pequenos
- Recipiente de plástico para acessórios



- 1 - Olivas auriculares que se encaixam perfeitamente no ouvido
- 2 - Haste de metal resistente
- 3 - Barra reguladora de tensão
- 4 - Tubo de condução do som em Y
- 5 - Auscultador que repassa os sons internos do paciente

Funcionalidades

Com 5 configurações diferentes disponíveis, este instrumento funciona como 5 estetoscópios diferentes para 5 finalidades específicas. Cada conjunto inclui 3 auscultadores intercambiáveis tipo sino, além dos 2 diafragmas padrão. Cada diafragma ou sino é adequado especificamente para 1 de 5 finalidades:

1. DIAFRAGMA GRANDE: Este auscultador é usado para filtrar as frequências mais graves e acentuar as frequências da faixa mais alta em adultos.

2. DIAFRAGMA PEQUENO: Este auscultador é usado para a detecção de sopros agudos em bebês e crianças.

3. SINO GRANDE: Este sino é usado para a detecção de sons e sopros graves e médios em adultos.

4. SINO MÉDIO: Este sino é usado para a detecção de sons e sopros graves e médios em crianças.

5. SINO PEQUENO: Este sino é usado para a detecção de sons e sopros graves e médios em adultos.

Instruções de Uso

Acomode os fones no ouvido. Bata suavemente em ambos os diafragmas para determinar qual lado do auscultador está operando. Para mudar o lado, rotacione o auscultador 180 graus até ouvir o "clique" da unidade na posição de operação.

Observação: Este produto não é feito com látex de borracha natural.

TERMOS DE GARANTIA

Esta garantia não cobre qualquer defeito do produto decorrente do uso e do desgaste natural ou decorrente da utilização inadequada, incluindo, sem limitações, o uso normal e habitual, de acordo com as instruções da Multilaser para o uso e a manutenção do produto. Esta garantia não cobre defeitos do produto decorrente de instalações, modificações, reparos ou quando o produto for aberto por um profissional não autorizado pela Multilaser. Esta garantia também não cobre defeitos no produto decorrentes do uso de acessórios ou outros dispositivos periféricos que não sejam originais da Multilaser projetados para o uso com o produto. Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovado, a Multilaser limita-se a consertar ou substituir o produto defeituoso. Este produto está garantido pela Multilaser pelo período de 1 ano. O certificado somente terá validade com a apresentação da NF de compra. Leia com atenção os termos de garantia acima.

NF/Nº _____

Data da Compra ____/____/____



Importado por: Multilaser Industrial S.A. CNPJ: 59.717.553/0006-17
R. Josepha Gomes de Souza, 382 - Pires, Extrema - MG, 37640-000

Fabricante: Wenzhou Bokang Instruments Co., Ltd
NO. 1500 HAINING RD HAIBN LONGWAN ZONE, WENZHOU 325024
CHINA

Responsável técnico: Lelius Lucca Braga - CREA/SP: 2608151337

Registro ANVISA nº 81596320040